


Zahnfleischrückgang – was nun?

Patienteninformation | Deckung freiliegender Zahnhälse

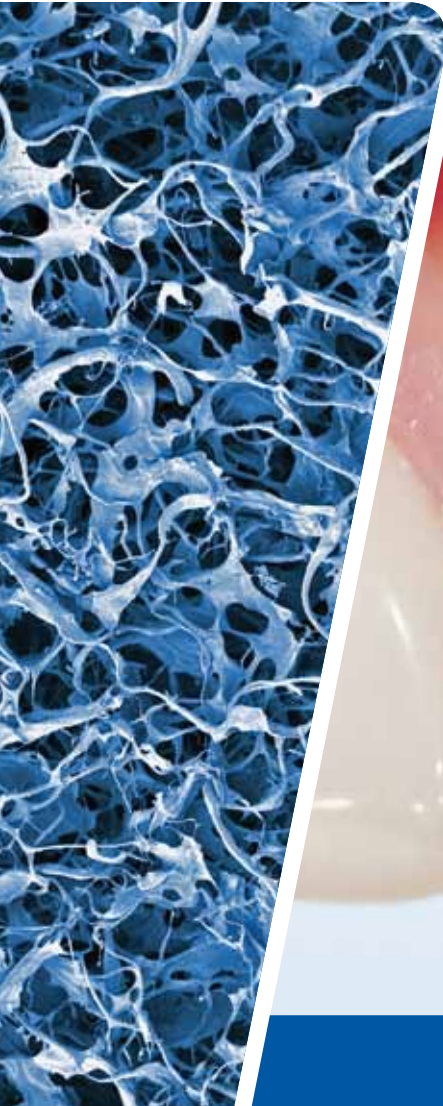

LEADING REGENERATION

Was geschieht bei unbehandeltem Zahnfleischrückgang?

Zahnfleischrückgang kann unterschiedliche Ursachen wie z. B. Fehlstellung der Zähne oder falsches Putzverhalten haben. Zunächst zeigt sich meist nur ein ästhetisches Problem. Es können jedoch auch gesundheitliche Probleme auftreten, wenn die Ursachen unbehandelt bleiben:

- > **Wurzelüberempfindlichkeit:** Die freiliegende Wurzel kann überempfindlich werden und bei Kontakt mit kalten oder heißen Substanzen Schmerzen verursachen.
- > **Weiterer Rückgang:** Knochen und Zahnfleisch am freiliegenden Zahnhals können sich noch mehr zurückziehen und so die bestehenden Probleme weiter verschlimmern.
- > **Zahnfleiscentzündung und Wurzelkaries:** Ein Fortschreiten unbehandelten Zahnfleischrückgangs kann die Mundhygiene erschweren, was wiederum zu Zahnfleiscentzündung und sogar Wurzelkaries führen kann. Falsches Putzverhalten kann den ungeschützten Zahnhals unwiderruflich zerstören.

Ein starker Verlust von Knochen und Zahnfleisch muss möglicherweise durch zeitaufwendige und kostenintensive Behandlungen behoben werden.

PROBLEM

Knochen und Zahnfleisch am freiliegenden Zahnhals können sich weiter zurückziehen. Der Zahnhals kann geschädigt werden.



Mässiger Zahnfleischschwund.



Mögliche Situation ohne Behandlung.

- > Beeinträchtigte Mundhygiene
- > Zahnfleiscentzündung
- > Zahnwurzelkaries

Mögliche Konsequenz nicht behandelten Zahnfleischschwunds.

Die schonende Lösung für die Behandlung Ihres Zahnfleisches

Was ist Geistlich Mucograft®?

- > **Produkt für die Weichgeweberegeneration:** Geistlich Mucograft® ist eine 3D-Matrix für die Weichgeweberegeneration in der Mundhöhle.
- > **Natürliches Kollagen:** Das Produkt wird aus Schweinekollagen hergestellt, das während des Regenerationsprozesses durch Ihr eigenes Weichgewebe ersetzt wird.
- > **Materialien in Schweizer Qualität:** Als zugelassenes Medizinprodukt erfüllt Geistlich Mucograft® höchste Standards für Qualität und Sicherheit.

Was sind Ihre Vorteile mit Geistlich Mucograft®?

- > **Weniger Schmerzen:** Geistlich Mucograft® vermeidet die Entnahme von Weichgewebe aus Ihrem Gaumen. Dies mindert Komplikationen an der Entnahmestelle wie etwa Schmerzen oder Infektionen.¹
- > **Einfachere Erholung:** Durch Wegfall der Weichgewebeentnahme aus Ihrem Gaumen können Sie sich leichter erholen und schneller zu Ihrer normalen Lebensweise zurückkehren.
- > **Kürzere chirurgische Behandlung:** Mit Geistlich Mucograft® ist die Operationsdauer durch Wegfall der Weichgewebeentnahme verkürzt.¹
- > **Hervorragende Weichgewebeheilung:** Geistlich Mucograft® integriert sich auf natürliche Weise in Ihr eigenes Weichgewebe, ohne Entzündungen hervorzurufen.^{1,2}
- > **Gute Anpassung an umgebendes Gewebe:** Das Produkt fördert eine gute Farb- und Strukturanpassung des regenerierten Gewebes.²



Die Entnahme von Weichgewebe aus dem Gaumen ...



... wird mit Geistlich Mucograft® vermieden.

Wie kann Zahnfleischrückgang behandelt werden?

LÖSUNG

Zahnfleischrückgang kann häufig mit einem geeigneten chirurgischen Ansatz behandelt werden. Ihr Arzt berät Sie hinsichtlich der für Sie individuell passenden Behandlung.



Chirurgische Bildung eines Weichteillappens für die Behandlung eines Zahnfleischschwunds.



Geistlich Mucograft® wird in die betroffene Region eingebracht, um das Gewebe zu stabilisieren.



Der Weichteillappen wird über den freiliegenden Zahnhs gelegt und vernäht.



Ergebnis einer vollständigen Deckung nach Heilung (Resultate können je nach Ausgangssituation variieren).

ES IST WICHTIG, die Ursache des Zahnfleischschwunds vor einer chirurgischen Behandlung anzugehen. Ihr behandelnder Arzt wird Ihnen eine individuelle Behandlungsmethode empfehlen, wie beispielsweise die Änderung des Putzverhaltens oder die Notwendigkeit einer kieferorthopädischen Vorbehandlung.

Warum ist Geistlich Mucograft® vorteilhaft für Sie?

Der natürliche Zustand des Zahnfleischs wird wiederhergestellt

und Ihr Lächeln bleibt attraktiv

Erhaltung von Knochen und Zahnfleisch

unterstützt die Erhaltung gesunder Zähne

Wegfall der Gewebeentnahme aus Ihrem Gaumen

bedeutet weniger Schmerzen und höhere Lebensqualität



Zahnfleischrückgang und freiliegender Zahnhals (Dr. N. Braz de Oliveira).



Ziel der Behandlung ist der Aufbau von Zahnfleisch zur Abdeckung des Zahnhalses (Dr. N. Braz de Oliveira).



Ein paar Tipps für die postoperative Nachsorge:

- › Behandeln Sie Schwellungen mit feucht-kalten Kompressen, ohne diese anzudrücken.
- › Bei Schmerzen verschreibt Ihnen Ihr Zahnarzt ein geeignetes Medikament.
- › Meiden Sie für 3 Tage nach dem Eingriff heisse Speisen und Getränke sowie Alkohol und Zigaretten.
- › In den ersten vier Wochen soll auf Bürsten oder Verwenden von Zahnseide am betroffenen Zahnfleischrand und auf Kauen harter Lebensmittel verzichtet werden.
- › 4–8 Wochen nach der Operation sind die Mundhygieneanweisungen Ihres Zahnarztes zu befolgen (weiche Zahnbürste).
- › 8–12 Wochen nach dem Eingriff beginnen Sie mit dem normalen sorgfältigen Putzen und Bürsten.
- › Rauchen und ungenügende Mundhygiene können den Therapieerfolg massiv beeinträchtigen oder sogar zu einem Therapiemisserfolg führen.
- › Die Kontrolltermine bei Ihrem Zahnarzt sollten Sie auch bei problemloser Heilung unbedingt einhalten.

Geistlich Biomaterials dankt Dr. N. Braz de Oliveira, Dr. R. Abundo, Dr. G. Corrente und ACME Publishing für die freundliche Überlassung der in dieser Broschüre verwendeten Bilder.

¹ Cardaropoli D, et al. J Periodontol. 2012 MAR;83(3):321-8

² McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol. 2010 Aug;81(8):1108-17

Vertrieb Deutschland
Geistlich Biomaterials
Schneidweg 5
D-76534 Baden-Baden
Tel. +49 7223 9624-0
Fax +49 7223 9624-10
www.geistlich.de

Vertrieb Schweiz
Karr Dental AG
Böhrnirainstrasse 9
CH-8800 Thalwil
Tel. +41-44 727 40 00
Fax +41-44 727 40 10
fragen@karrdental.ch
www.karrdental.ch

Vertrieb Österreich
DENTSPLY Austria GmbH
Liesinger Flur-Gasse 4
A-1230 Wien
Tel. +43-1 205 12 00
Fax +43-1 205 00 5374
kommunikation.austria@dentsply.com

Hersteller
©Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen
Tel. +41-41-4925 630
Fax +41-41-4925 639
www.geistlich-pharma.com
www.geistlich-mucograaft.com

Näheres zu unseren Vertriebspartnern finden Sie unter:
www.geistlich-pharma.com/mycontact